



C/ General Zabala, 4  
28002 MADRID  
☎ 91 564 59 00 – 564 59 60  
FAX: 91 564 28 65  
[info@oftalmicabonet.com](mailto:info@oftalmicabonet.com) // [www.oftalmicabonet.com](http://www.oftalmicabonet.com)

## **CERILLAS DE PAPEL IMPREGNADAS DE FLUORESECINA** **I-DEW FLO, marca ERC / UK**



Dispositivo de diagnóstico reservado al uso de profesionales.

Uso externo.

Las cerillas son estériles mientras el embalaje individual permanezca intacto.

Cada cerilla está impregnada con un miligramo de fluoresceína sódica farmacopea, bajo peso molecular.

Nº de lote y fecha de caducidad indicado en cada blister individual

Indicaciones: coloración del segmento anterior del ojo que muestre las lesiones corneales y fonometría de aplanación.

Modo de empleo:

- Para obtener una fluorescencia óptima y para comodidad del paciente, el extremo coloreado de la cerilla, se puede humedecer con 1 o 2 oras de suero fisiológico
- Colocar la parte húmeda sobre la conjuntiva o el fondo conjuntivo
- Después de la aplicación, pedir al paciente parpadear varias veces para que se distribuya homogéneamente la fluoresceína.

Forma de presentación: I-DEW FLO, caja de 100 cerillas estériles individualmente

Pedido mínimo : 12 cajas